Démarrez avec Q-interactive

Guide de démarrage Q-interactive



Voici les consignes relatives à l'installation de l'application Q-interactive® Assess, la mise au point des réglages appropriés sur les deux appareils iPad®, la finalisation de vos identifiants de connexion et la création d'une séance de simulation d'évaluation. Nous vous recommandons de vous exercer quelques fois avant d'évaluer des clients réels.

SECTION 1 : Télécharger l'application

Afin d'utiliser le système, l'application Q-interactive Assess doit être téléchargée sur les deux iPads.

ÉTAPE 1



Ouvrez l'App Store, qui se trouve sur l'écran d'accueil de l'iPad.

ÉTAPE 2



Recherchez Q-interactive et appuyez sur « OBTENIR ».



SECTION 2 : Configurer les iPads

Une fois Assess téléchargé, configurons les réglages des deux appareils. Cette étape est essentielle pour quelques raisons :

- S'assurer que les iPads s'appairent correctement afin de saisir les données l'un de l'autre.
- · Afficher les stimuli de manière standardisée.
- Contribuer au bon fonctionnement de Q-interactive.
- Éliminer les distractions qui peuvent survenir pendant l'évaluation. liminate distractions, which may occur during the assessment.

ÉTAPE 1



Appuyez sur l'application Réglages située sur l'écran d'accueil.

ÉTAPE 2

Réglez vos iPads conformément au tableau suivant. Q-interactive Assess utilise le Wi-Fi pour connecter les appareils du praticien et du client. Vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi actif pour télécharger et synchroniser les évaluations. Il n'est pas nécessaire d'être connecté à un réseau Wi-Fi actif pour administrer les évaluations, mais le Wi-Fi doit être activé sur les deux appareils.

iPad du praticien	iPad du client	Réglage	Menu	Choix	
•	•	Wi-Fi	Activer le Wi-Fi	Sélectionner le réseau	
•	•	Général	Clavier	Désactiver les majuscules automatiques	
•	•	Général	Clavier	Désactiver la correction automatique	
	•	Luminosité et affichage	Luminosité	Faire glisser la barre vers l'extrême droite	
	•	Luminosité et affichage	Night Shift	Désactiver	
	•	Luminosité et affichage	True Tone	Désactiver True Tone	
•	•	Luminosité et affichage	Verrouillage automatique	15 Minutes	
	•	Accessibilité	Affichage et taille du texte	Désactiver la luminosité automatique	

SECTION 3 : Créer une séance d'évaluation

Votre courriel de bienvenue vous permet de démarrer en établissant d'abord vos identifiants de connexion.

ÉTAPE 1



Le lien « Connectez-vous » affichera l'écran pour établir votre mot de passe Q-interactive.

Après avoir soumis le mot de passe et accepté les Conditions d'utilisation de Qinteractive, vous êtes maintenant prêt à créer une séance de simulation d'évaluation.

ÉTAPE 2



Dans l'onglet Tableau de bord, cliquez sur le bouton Simulation d'évaluation pour créer le profil du client de simulation et sauvegarder.

ÉTAPE 3

Étape 2 :	Ch	oisir	la batte	batterie			
Favorites		C, Nom de la	batterie Brozen	ther Apr	rçu des prix 🛛 🗸		
Age	+						
Domaine	•	۰ 🦡	CELF-5 Åges 5- 8 CDN-F	Une évaluation des troubles du langage cral et de la communication chez l'enfant et l'adolescent.	10 sous-tests 97 min.		
Type de sous-test	•	•	CELF-5 Åges 0- 16 CDN-F	Une évaluation des troubles du langage oral et de la communication chez l'enfant et l'adolescent.	10 sous-tests 108 min.		
		•	EVT-3 CDN-F	Un test de vocabulaire expressif pour les francophones du Canada.	1 sous-test 20 min.		

Sélectionnez la batterie en cliquant sur le bouton de gauche, puis cliquez sur le bouton Suivant.



Configurez la date et l'heure de l'administration et cliquez sur le bouton Terminer.

ÉTAPE 5

Tableau de bord 0	Clients	Batteries	Evaluations	Aide		
						Experien was
Mes évaluations actuelles Toutes mes évaluations	e Pr	éparation				
Evaluations sur liPad Évaluations archivees	étudian	t étudiante - Evalua	ition	,	Aujourd'hui	Envoyer à l'Pa

Cliquez sur le bouton Envoyer à l'iPad et vous serez prêt à vous connecter aux iPads!

Pour commencer l'évaluation, connectez-vous aux deux iPads avec les mêmes identifiants de connexion que ceux établis précédemment.

ÉTAPE 6



Vos iPads se connecteront lorsque vous commencerez votre évaluation et que les deux iPads auront été configurés correctement.

ÉTAPE 8

ire Départ
Not starte
(20 min.
trases (6 min.
89 () 6 min.
(10 min.
(5) 8 min.
es 🕓 9 min.

Appuyez sur le bouton Départ pour commencer l'évaluation. Les séances de simulation d'évaluation ont toutes les fonctionnalités des séances d'évaluation réelles, sauf que tous les scores sont remis à zéro par défaut.

ÉTAPE 7



Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Prévoyez 10 à 20 minutes pour le téléchargement de votre bibliothèque complète de tests.

Félicitations! Vous êtes maintenant prêt à utiliser Q-interactive!

866-335-8427 PearsonClinical.ca/fr

Copyright © 2023 Pearson Education, Inc. ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Pearson et Q-interactive sont des marques de commerce de Pearson PLC, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. iPad est une marque déposée d'Apple Inc. C6115 SR 07/23

